



**Govern
de les Illes Balears**
Hospital Son Llàtzer

ANATOMIA PATOLOGICA

Nº: IT-75-APA-10C

Rev.: A

Página 1 de 5

Instrucción técnica

Recepción de muestras

Modificaciones

Revisión	Fecha	Descripción
A	15/07/09	Primera edición

Preparado	Revisado	Aprobado
Nombre: Magdalena García Bonafé Cargo: Jefe de Servicio A. Patológica Fecha: 15/07/09 Firma:	Nombre: Montserrat García Minguillán Cargo: Resp. Gestión de Procesos y U. de Calidad Fecha: 15/07/09 Firma:	Nombre: Luis Alegre Latorre Cargo: Director Gerente Fecha: 15/07/09 Firma:

 <p>Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer</p>	<p>ANATOMIA PATOLOGICA</p>	Nº: IT-75-APA-10C
		Rev.: A
		Página 2 de 5

Instrucción técnica
Recepción de muestras

GENERAL

1. PERSONAL IMPLICADO

- PAS / MENSAJERO
- TEAP
- ADMINISTRATIVO
- PATÓLOGO

PROTECCIÓN PERSONAL

- Guantes
- Mascarilla
- Delantal de plástico
- Gafas protectoras

2. MATERIAL

- BOTES CON MUESTRAS DE TAMAÑOS DIFERENTES (CITOLOGÍAS Y BIOPSIAS)
- BOTES VERDES DE CITOLOGÍA LÍQUIDA GENERAL
- BOTES ROSA DE CITOLOGIA LÍQUIDA GINECOLÓGICA
- PORTAS: CITOLOGÍA GENERAL (CEPILLADOS) Y GINECOLÓGICA
- ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS PROPIAS DE APA (donde figura NHC y CÓDIGO DE PEDIDO)
- HOJAS DE PETICIÓN (MEDLINK)
- CARPETA ROSA (con etiquetas de registro) PARA PETICIONES DE CITOLOGÍA
- CARPETA VERDE (con etiquetas de registro) PARA BIOPSIAS.

3. HORARIO / LUGAR

DE 8:00 A 14:30 (se realiza entrega /recepción de muestras a lo largo de la mañana, según el servicio de origen) Tubo neumático 132.

La recepción se hace en una mesa situada en el área de PARAFINA /MICROTOMÍA (laboratorio).

INSTRUCCIONES GENERALES

- Agrupar las muestras por paciente.
- Grapar las peticiones por paciente, separando las muestras de CITOLOGIAS Y BIOPSIAS.
- Si en el bote existe alguna anotación que no figura en la hoja de petición, se transcribirá a esta hoja.


INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES

- **Biopsias de Urología:**

Suelen ser varios botes de distintos pacientes.

Estos botes pueden contener:

Biopsias: en botes herméticos fijadas en formol

 <p>Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer</p>	<p>ANATOMIA PATOLOGICA</p>	Nº: IT-75-APA-10C
		Rev.: A
		Página 3 de 5

Instrucción técnica

Recepción de muestras

Independientemente del número de botes recibidos habrá una única petición que deberá reflejar en "motivo de solicitud" el nº de botes exactos que se reciben de cada paciente.

- **Biopsias en fresco para estudios IFD:**

Avisar al patólogo inmediatamente que procederá al tallado del punch y el TEAP lo envolverá en papel de plata e identificará con la etiqueta numerada que coincida con el número de registro de la muestra y anotando el tipo de estudio que debe realizarse (IFD).

CITOLOGÍAS PARA ESTUDIO ZENCKER: cristales con material extendido con hoja de petición. Se avisará al patólogo o al citotécnico.

- **Biopsias de Nefrología**

Ocasionalmente el nefrólogo trae biopsias renales en fresco.

Avisar inmediatamente al patólogo y:

- Preparar la lupa, una placa de petri y suero fisiológico.
- El patólogo decidirá tras el contaje de glomérulos renales el tipo de procesado que recibirá la muestra:
 1. Estudio de microscopia óptica: Fijar en formol y posterior inclusión en parafina.
 2. Para realizar INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA: en este caso se envolverá en papel de plata e identificará con la etiqueta numerada que coincida con el número de registro de la muestra y anotando el tipo de estudio que debe realizarse (IFD) y se congelará en isopentano a -80°C.

- **Citologías de PAAF desde radiología**

Jeringas con aguja y fiador. Muchas veces éstas *no vienen identificadas* pero traen la hoja de petición. Al no venir identificadas, el servicio de radiología habrá avisado, telefónicamente, con antelación a la administrativa o al patólogo, quien informará a su vez al citotécnico y TEAP de la llegada de la muestra.


- Se recogen y se avisa inmediatamente al citotécnico.

- **Citologías de orinas**

Llegan con una única hoja de petición y tres botes con muestras que se registran con nº internos diferentes.

- **Fetos completos menores de 22 semanas de gestación:**

Procedentes de ILES o abortos espontáneos, en horario de mañana se remitirán en fresco a APA junto con la petición y se avisará a la extensión 1349. A partir de las 15 h. y en sábados, domingos y festivos se guardarán junto con la petición en cámara frigorífica situada en el área de citología del laboratorio de APA y se avisará por e-mail a cgarcia2@hsl.es y/o seguizab@hsl.es.

 <p>Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer</p>	<p>ANATOMIA PATOLOGICA</p>	Nº: IT-75-APA-10C
		Rev.: A
		Página 4 de 5

<p>Instrucción técnica Recepción de muestras</p>

- **Biopsias Intraoperatorias:** según **PC-75-APA-23 P. biopsias intraoperatorias**

- **Biopsias de ganglios linfáticos en fresco:**

1. El patólogo realizará improntas para teñir en Diff-Quick.
2. El resto se fijará en:
3. Formol
4. Congelación

INSTRUCCIONES PARA CITOLOGÍA GINECOLÓGICA

Llegan:

1. Portas con material extendido y fijado con citospray. Vienen identificados en la zona esmerilada con el nombre del paciente y NHC. También vienen en botes rosas de CITOLOGÍA LÍQUIDA con triple toma.
2. Varias peticiones unidas a una caja con portas.

Hay que:

3. Abrir el contenedor de muestra.
4. Comprobar que están marcados los datos de la paciente y que se corresponden a los de la petición.
5. Hay que poner a mano el nº de registro que siga al indicado en el listado correspondiente del laboratorio para este tipo de muestras y con una letra G (citologías ginecológicas procedentes de consultas de ginecólogos del hospital y centros de salud, no del plan de prevención)
6. Pasar los portas al laboratorio.
7. Pasar las solicitudes a secretaria.