
 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3F
	MANEJO DEL SENOVISION	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-3F
	MANEJO DEL SENOVISION	Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para el manejo del senovision

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL POSICIONADOR DE ESTEROTAXIA SENOVISION

DMR:

1º_ Retirar la paleta de compresión y elevar el brazo del compresor a la posición mas alta posible.

2º_ Retirar el receptor de imagen (bucky). Retirar el protector facial

3º_ Reducir la distancia focal a 510 (código de color azul)

4º_ Montar el posicionador de esterotaxia SenoVision en el DMR.

5º_ Introducir las barras cilíndricas en los orificios de código azul.

6º_ Ajustar los cierres laterales.

7º_ Colocar el display digital del posicionador en el mismo o en el brazo del DMR (utilizando los imanes destinados a este fin).


8º_ Conectar el cable en el lado izquierdo del posicionador

9º_ Introducir el casete digital en el receptor de imagen. Asegurarse de que la pestaña de fijación esta bloqueando el casete en su lugar.

10º_ Realizar el procedimiento con fantomas.

16º_ Comprobar visualmente que la aguja se ajusta perfectamente en los tres ejes.

17º_ Para repetir la comprobación con otro orificio, repetir el procedimiento comenzando en el punto 8 de la lista

 <p>Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer</p>	INSTRUCCIÓN MANEJO DEL SENOVISION	IT-75-RAD-3F
		Revisión: A
		Página 3 de 3

6. REGISTRO