
 <b>Govern de les Illes Balears</b> Hospital Son Llàtzer	<b>INSTRUCCIÓN</b>	IT-63-RAD-0A
	<b>Calibración del TC - SIEMENS SALA 10</b>	Revisión: A
		Página 1 de 2

<b>DISTRIBUCIÓN:</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

<b>SUMARIO DE MODIFICACIONES</b>		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 <b>Govern de les Illes Balears</b> Hospital Son Llàtzer	<b>INSTRUCCIÓN</b>  <b>Calibración del TC - SIEMENS SALA 10</b>	IT-63-RAD-0A
		Revisión: A
		Página 2 de 2

## 1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la calibración del TAC de la Sala 10, previa a su utilización.

## 2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

## 3. REFERENCIAS

## 4. RESPONSABILIDADES

## 5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

La calibración del TC se hará a primera hora de cada turno (Mañana, Tarde, Noche). En caso de no haberse realizado en estos horarios aparecerá en el TC un mensaje recordando el tiempo transcurrido desde la última calibración.

Consta de 3 pasos:

- Seleccionar "Configurar"
- Seleccionar "Prueba general"

Iniciar la calibración pulsando el disparador del TC

Este proceso dura aproximadamente 10 minutos. Una vez terminado aparece un mensaje indicando si la calibración se ha realizado correctamente.

## 6. REGISTRO