

 <b>Govern de les Illes Balears</b> Hospital Son Llàtzer	<b>INSTRUCCIÓN</b>	IT-63-RAD-0B
	<b>Limpieza de la sala y de las bobinas de la RM</b>	Revisión: A
		Página 1 de 3

<b>DISTRIBUCIÓN:</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

<b>SUMARIO DE MODIFICACIONES</b>		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
<small>La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.</small>	

	<b>INSTRUCCIÓN</b>  <b>Limpieza de la sala y de las bobinas de la RM</b>	IT-63-RAD-0B
		Revisión: A
		Página 2 de 3

## 1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la limpieza de la sala y las bobinas de la máquina de resonancia magnética

## 2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

## 3. REFERENCIAS

## 4. RESPONSABILIDADES

## 5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

La limpieza de las bobinas y de las esponjas correrá a cargo del TER, y se efectuará el primer miércoles de cada mes anotándolo en el registro correspondiente indicando día, hora, y nombre del TER que lo realiza.

Para limpiar las bobinas hay que utilizar una bayeta y un líquido no abrasivo. Se limpiaran una vez al mes.

Para limpiar las esponjas hay que utilizar una bayeta y un líquido no abrasivo. Se limpiaran una vez al mes y cada seis meses se lavaran a fondo.

El mantenimiento de la máquina que incluye calibrar y reajustar parámetros está a cargo del mantenimiento oficial contratado a General Electric.

El personal de limpieza se responsabilizará de mantener limpia la sala del IMAN (sala nº11) y la sala de mandos donde se encuentra la consola

El personal de limpieza deberá atender a unas normas antes de entrar a la sala de RM:

- Si es portador de algún tipo de prótesis o implante metálico deberá consultar con el TER antes de entrar a la sala.
- No se podrán pasar elementos ferromagnéticos.
- La limpieza se realizará diariamente tanto de la antesala, cabinas y sala de RM.

Todas las noches después de la limpieza de la sala se deberán cerrar todas las puertas con llave.

 <b>Govern de les Illes Balears</b> Hospital Son Llàtzer	<b>INSTRUCCIÓN</b>	IT-63-RAD-0B
	<b>Limpieza de la sala y de las bobinas de la RM</b>	Revisión: A
		Página 3 de 3

## 6. REGISTRO

Se llevará a cabo un registro en papel con el siguiente formato:

<b>FECHA/hora</b>	<b>TER</b>	<b>BOBINAS</b>	<b>MENSUAL ESPONJAS</b>	<b>SEMESTRAL ESPONJAS</b>