

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	ANATOMIA PATOLOGICA	Nº: IT-75-APA-0A
		Rev.: A
		Página 2 de 3

<h2 style="margin: 0;">Instrucción técnica</h2> <h3 style="margin: 0;">Mantenimiento teñidor nuevo</h3>

BIOPSIAS:

LIMPIEZA DIARIA (lunes a jueves a las 14:30 h):

Vaciado de cubetas en garrafa de residuos:

Agua destilada (cubeta 6)
 Alcohol ácido (cubeta 14)
 Agua amoniacal (cubeta 16)
 Alcohol 70º (cubeta 18)
 Alcohol 96º (cubetas 20 y 21)
 Alcohol 100º (cubetas 22 y 23)
 Xilol (cubeta 25)

Vaciado de cubetas de hematoxilina (cubetas 7, 8, 9, 10 y 11) en un cubo con tapa y guardar para el día siguiente.

Los MIERCOLES además quitar las cubetas 1, 2, 3, 4 y 5.

Poner a lavar en el lavavajillas.

LIMPIEZA VIERNES (a las 14:30 h):

Vaciado de todas las cubetas del teñidor en garrafa de residuos:

Guardar la hematoxilina (cubetas 7, 8, 9, 10 y 11) en un cubo con tapa para la semana siguiente*

* Comprobar en registro de colorantes si toca guardar toda la hematoxilina o bien la mitad de ésta (cada 15 días)

PREPARACIÓN TEÑIDOR (8:00 h):

Si se ha tirado la cubeta 24 del xilol el día anterior, retrocederán a las cubetas posteriores (25, 26 y 27) una posición, pasando a ocupar la 24, 25 y 26 respectivamente.

Rellenar todas las cubetas que falten.

Filtrar la hematoxilina en otro cubo y rellenar las cubetas antes de ponerlas al teñidor.*

* Si sólo hay la mitad de la hematoxilina completar con nueva que también ha de ser filtrada.

 <p>Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer</p>	<p>ANATOMIA PATOLOGICA</p>	Nº: IT-75-APA-0A
		Rev.: A
		Página 3 de 3

<p>Instrucción técnica Mantenimiento teñidor nuevo</p>

CITOLOGIAS:

LIMPIEZA DIARIA (lunes a jueves a las 14:30 h):

Vaciado de cubetas en garrafa de residuos:

Agua destilada (cubeta 4)

Alcohol ácido (cubeta 8)

Agua corriente estancada (cubetas 6, 7, 9 y 10)

Alcohol 96º (cubetas 16, 17, 19 y 20)

Alcohol 100º (cubetas 22 y 23)

Xilol (cubeta 25)

Los MIERCOLES además quitar las cubetas 1, 2 y 3.

Poner a lavar en el lavavajillas.

LIMPIEZA VIERNES (a las 14:30 h):

Vaciado de todas las cubetas del teñidor en garrafa de residuos:

Guardar la hematoxilina (cubetas 5), el OG-6 (cubetas 14 y 15) y el EA-50 (cubeta 18) en un matraz tapado con parafilm y guardar para la semana siguiente*

* Comprobar en registro de colorantes si toca guardarlos o tirarlos (cada 15 días)

PREPARACIÓN TEÑIDOR (8:00 h):

De martes a viernes: pasar la cubeta 21 a la posición 19, la 24 a la posición 22, y la 26 y 27 a las posiciones 25 y 26 respectivamente.

Rellenar todas las cubetas que falten.

Los lunes filtrar todos los colorantes antes de ponerlos.

De martes a viernes filtrar sólo la hematoxilina.

Todo ello queda registrado en el **AX-75-APA-0AA Registro de cambios de colorantes.**