

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN TÉCNICA Preparación de diluciones para estudios inmunohematológicos	IT-75-HEM-10
		Revisión: A
		Página 1 de 2

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Hematología	Jefe de la Unidad de Hematología
Enfermería	Coordinadora de Enfermería

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	29/01/07	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Marga Alcover Cargo: Coordinadora de Enfermería Fecha: 29/01/07	Nombre: Joan Bargay Cargo: Jefe de Unidad de Hematología Fecha: 29/01/07
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra en la Intranet de Hospital Son Llàtzer. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

DEFINICIÓN

Consiste en adecuar la concentración de hematíes a la técnica a realizar.

MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN

- Solución salina isotónica (suero fisiológico).
- Diluyentes ID-diluyent 1 o 2 DiaMed según requiera la técnica en la que usaremos la dilución.
- Tubos.
- Pipetas con graduación en μl . Puntas de pipeta desechables.
- Pipetas pasteur desechables.
- Centrífuga.

PROCEDIMIENTO

Hacer la dilución adecuada utilizando el diluyente apropiado a la técnica:

En 1 ml. de diluyente

- Dilución al 1% : 10 μl de hematíes.
- Dilución al 2-3%: 25 μl de hematíes .
- Dilución al 5%: 50 μl . de hematíes.
- Dilución al 10%: 100 μl de hematíes.